



# Silla de ruedas estándar

tipo escritorio en acero pintado

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

## Especificaciones

 Estructura en acero pintado.


 Cojinería en nylon negro.


### FS909B


Diseñada para facilitar el trabajo en escritorios, esta silla de ruedas en acero ofrece resistencia y durabilidad. Cuenta con apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles para adaptarse a las diferentes necesidades del usuario. Su estructura robusta y sus llantas traseras de poliuretano en rin estrella garantizan estabilidad y durabilidad. Cuenta con una capacidad de carga de 100 kg.

*Este producto se encuentra sujeto a inventario.*

 Apoyabrazos abatibles.

 Freno de parqueo.

 Rueda trasera en poliuretano, rin de estrella 24".

 Apoyapiés removibles.

 Rueda delantera maciza 8".

Imagen ilustrativa\*

## Imagen del producto




## Medidas

Capacidad de peso | Peso del producto

 **100kg**

 **13.8kg**

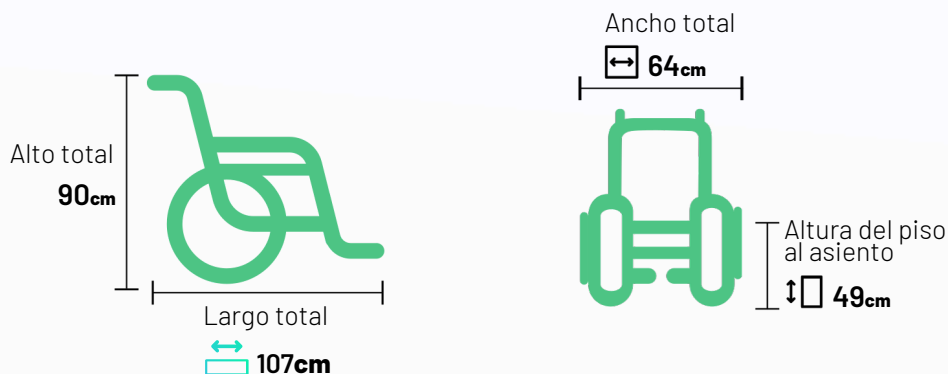

## Medidas del asiento

 Profundidad **40cm**

 Ancho **46cm**

 Altura espaldar **41cm**

## Recomendaciones

- Ajustar los apoyapies a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

## Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.