

Caminador plegable

paso a paso - Plata

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM - 0020413

Especificaciones



Manillares en espuma, ubicados en las barras laterales.



Estructura plegable en aluminio.



Botón para plegar y desplegar.

FS913L

Fabricado en una estructura plegable de aluminio ligero, ideal para brindar soporte y seguridad en cada paso. Su diseño permite ajustar la altura y la posición de los pasos, adaptándose a las necesidades individuales de cada persona. Cuenta con manillares cómodos, y un sistema de plegado fácil y rápido.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Imagen ilustrativa*

Graduación de altura mediante pin.



Doble sistema de pasos. (paso a paso y fijo)



Tapones antideslizantes.

Imagen del producto




Medidas

Capacidad de peso

 **100kg**

Peso del producto

 **2.72kg**

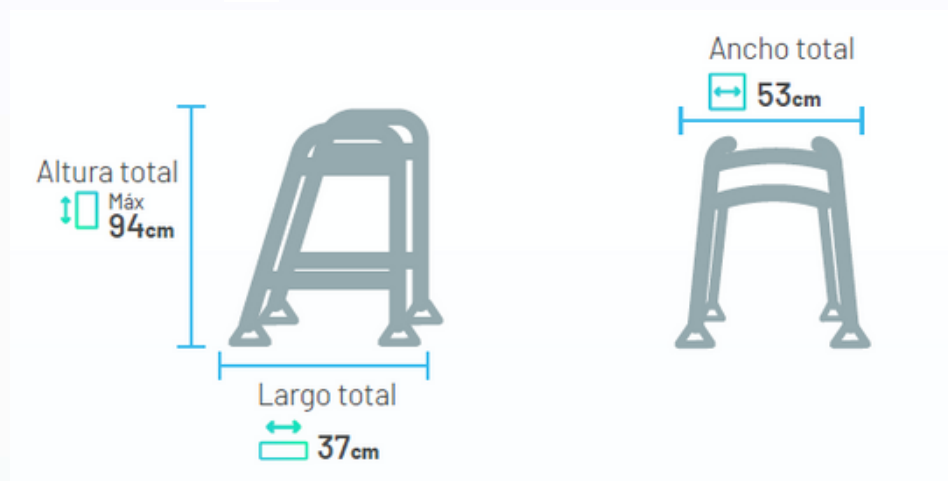

Recomendaciones

- No exceder el peso, al momento de hacer uso del producto.
- Secar inmediatamente el producto después de entrar en contacto con el agua.
- Asegúrese de que el caminador esté ajustado a su altura.
- Las empuñaduras deben estar a nivel de las muñecas cuando esté de pie y con los codos ligeramente flexionados.
- Evite caminar en superficies irregulares o con desniveles, ya que pueden aumentar el riesgo de resbalones o caídas.
- Revisar periódicamente los tapones antideslizantes del caminador para asegurarse de que estén en buenas condiciones.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fábrica en la estructura, no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.